


КАПСУЛА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ PillCAM PATENCY

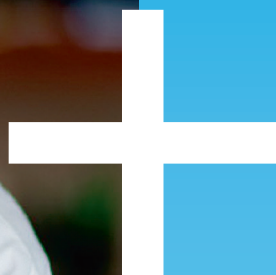

Капсула диагностическая PillCam Patency

Простой способ подтвердить проходимость
желудочно-кишечного тракта

КАПСУЛА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ PILLCAM PATENCY

Успех видеокапсульной эндоскопии зависит в том числе от беспрепятственного прохождения видеокапсулы по желудочно-кишечному тракту (ЖКТ). Радиологический метод позволяет выявить стриктуры или непроходимость ЖКТ, но не дает предположений о природе такой патологии.¹

Капсула диагностическая PillCam Patency позволяет выявить стенозированные области в кишечнике.²

Обладая этими знаниями, вы можете с уверенностью определить, станет ли видеокапсульная эндоскопия следующим шагом в вашем диагностическом плане.

КАПСУЛА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ PILLCAM PATENCY ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Эта процедура включает в себя прием внутрь небольшой растворимой капсулы. Если капсула покидает организм пациента до того момента, как она начинает растворяться, это говорит о том, что желудочно-кишечный тракт пациента проходим для объекта, схожего с размером капсулы PillCam Patency.

Режим проведения процедуры:

День 0: Жидкая диета с 12:00, воздержание от воды и пищи с 22:00.

День 1: Прием капсулы Patency в 9:00 – 10:00

День 2: Проверка результата* (ориентировочно, но не позднее, чем через 30 часов после приема капсулы)

**Проходимость
подтверждена**

**Проходимость
не подтверждена**

*Капсула может начать растворяться через 30 часов.

Проходимость подтверждена

Проходимость не подтверждена



КАПСУЛА НЕ ПОВРЕЖДЕНА

Оболочка капсулы и боковые пробки практически целы.



ОБОЛОЧКА КАПСУЛЫ РАЗРУШЕНА

Тело капсулы потеряло исходные размеры и стало мягким.



ОБОЛОЧКА КАПСУЛЫ ПОВРЕЖДЕНА

Тело капсулы цельное и твердое, но боковые пробки вскрыты.



ПУСТАЯ ОБОЛОЧКА И ОТДЕЛЬНАЯ РЕНТГЕН- КОНТРАСТНАЯ МЕТКА

Содержимое капсулы растворено полностью, рентген-контрастная метка отделена от капсулы.



Удобство для врача и пациента



- Капсула является растворимой и биосовместимой
- Тело капсулы состоит из лактозы с содержанием 10% бария, а также содержит миниатюрную рентген-контрастную метку, что позволяет визуализировать капсулу при помощи рентгена в случае необходимости

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ КАПСУЛЫ

В случае, если пациент затрудняется подтвердить выход капсулы из организма, можно сделать рентгеновский снимок и определить местоположение PillCam Patency с помощью визуализации рентген-контрастной метки.

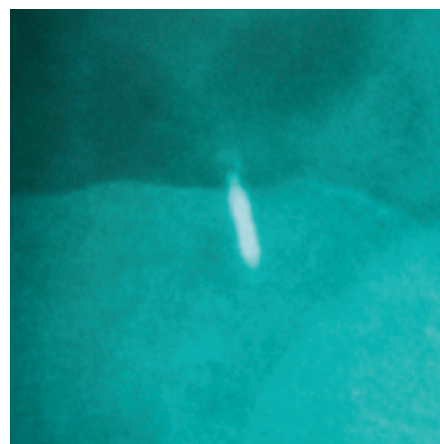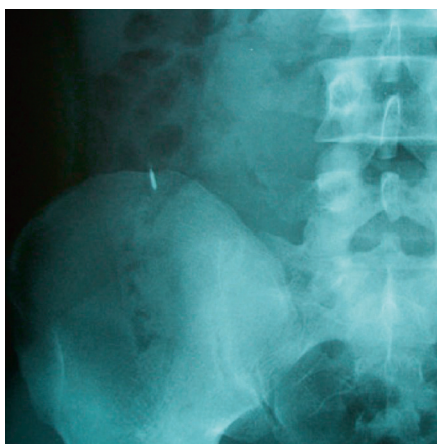

FURTHER, TOGETHER

Капсула диагностическая PillCam Patency предназначена для проведения предварительного теста на проходимость ЖКТ и может на один шаг приблизить вас к постановке диагноза.

Компания Medtronic гордится тем, что сотрудничает с сообществом гастроэнтерологов и эндоскопистов по всему миру, поскольку мы работаем над достижением нашей общей цели – раннего выявления заболеваний ЖКТ.



Капсула диагностическая PillCam Patency может быть использована в качестве предварительного шага к последующему проведению процедуры видеокапсульной эндоскопии при помощи:

- Видеокапсулы для осмотра тонкой кишки PillCam SB3
- Видеокапсулы для осмотра толстой кишки PillCam COLON2
- Видеокапсулы для осмотра всего кишечника PillCam Crohn's



PillCam SB 3



PillCam Crohn's



PillCam COLON 2

Информация о рисках: К рискам, связанным с прохождением капсулы по ЖКТ, относятся задержка капсулы и аспирация. Эндоскопическая доставка капсулы может представлять дополнительные риски. В случае возникновения любого из этих осложнений может потребоваться медицинское, эндоскопическое или хирургическое вмешательство. После приема PillCam Patency и до тех пор, пока капсула не будет выведена из организма, пациенты не должны находиться вблизи каких-либо источников мощных электромагнитных полей, например, источника, создаваемого рядом с устройством МРТ. Выход из организма капсулы диагностической PillCam Patency в неповрежденном виде не исключает наличия стриктуры кишечника или другой патологии. Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя продукта для получения подробной информации.

Только для медицинских специалистов. Весть товар сертифицирован.

«Система капсульной эндоскопии PillCam Crohn's с принадлежностями» РУ № РЗН 2020/1308 от 30.12.2020

«Капсула диагностическая PillCam Patency» РУ № РЗН 2016/4583 от 01.03.2017

«Видеокапсула диагностическая PillCam с принадлежностями» РУ № ФСЗ 2012/12231 от 01.03.2017

«Система эндоскопическая для визуальной диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта PillCam с принадлежностями» РУ № ФСЗ 2012/12306 от 01.03.2017

Источники:

1. Herrerias JM, et al. Agile patency system eliminates risk of capsule retention in patients with known intestinal strictures who undergo capsule endoscopy. Gastro Endoscopy. 2008;67:902-909.
2. Caunedo-Alvarez A, et al. Patency and Agile capsules. World Journal Gastroenterology. 2008;14(34):5269-5273.
3. Liao Z, Gao R, Xu C, Li ZS. Indications and detection, completion and retention rates of small-bowel capsule endoscopy: a systematic review. Gastrointest Endosc. 2010;71(2):280-286.

Medtronic

ООО "Медтроник"

123112, г. Москва,
Пресненская наб., д.10, эт.9, ком. 41
Тел.: +7 (495) 580-73-77
Факс: +7 (495) 580-73-78
E-mail: info.russia@medtronic.ru

ВАЖНО: Полные инструкции, противопоказания, предупреждения и меры предосторожности см. на вкладыше в упаковке.

© Медтроник, 2020. Все права защищены. Medtronic, логотип Medtronic и Further, Together являются товарными знаками Medtronic. Все остальные бренды являются товарными знаками компании Medtronic.

www.medtronic.ru